

Die richtige Handhabung



**Darauf sollte man achten -
 Einmalige Verwendung der Nadel**

Pen-Nadeln sind Einmalprodukte. Verwenden Sie bei jedder Injektion eine frische Nadel – Ihrer Gesundheit zuliebe! Eine Pennadel mehrfach zu verwenden kann zu unerwünschten Folgen führen:

- Schmerzen, da die gleitfähige Silikonbeschichtung bei der ersten Injektion abgenutzt wurde
- Schmerzen durch eine stumpfe Nadelspitze
- Ungenaue Insulindosierung und Verstopfung der Nadel durch auskristallisiertes Restinsulin von vorheriger Injektion
- Lipohypertrophie durch kleinste Verletzungen an der Einstichstelle

wwellion®

Besuchen Sie uns unter
www.medtrust.at • www.wellion.at
www.medtrust.de • www.wellion.eu/de

wwellion®


Bauch

ÖSTERREICH:
 MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H.
 Gewerbepark 10 • A-7221 Marz
 Tel.: (+43)02626/64190 • Fax: DW 77
 e-mail: office@medtrust.at • www.medtrust.at • www.wellion.at

DEUTSCHLAND:
 MED TRUST GmbH
 Zur Wetterwarte 50/Haus 337L • D-01109 Dresden
 Tel.: (+49)0351/253887-0 • Fax: (+49)0351/253887-19
 e-mail: office@medtrust.de • www.medtrust.de • www.wellion.eu/de

MED TRUST
 THE MEDICAL SERVICES COMPANY


**JETZT
 ANMELDEN!**
www.wellion.at
wellion
 Club

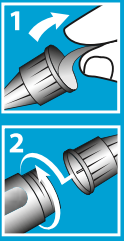

1. Nach der Entnahme einer frischen Pen-Nadel entfernen Sie zuerst das Hygienesiegel.
2. Schrauben Sie anschließend die Pen-Nadel auf Ihren Insulin-Pen und entfernen Sie dann die äußere Nadelschutzhülle.



3. Nach dem Abziehen der inneren Nadelschutzhülle wird die Durchlässigkeitsprobe durchgeführt. Stellen Sie dazu am Pen 2 Einheiten Insulin ein und spritzen Sie diese in die Luft.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Insulin an der Spitze der Nadel austritt.

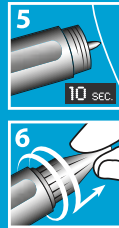

5. Nun kann die nötige Insulindosis am Pen eingestellt werden. Stechen Sie die Nadel in die Haut und drücken Sie den Auslöseknopf des Pens. Zählen Sie bis 10 und ziehen Sie erst dann die Nadel aus der Haut.
6. Schrauben Sie nun die gebrauchte Nadel vom Pen ab – Sie können dazu die äußere Schutzkappe verwenden. Entsorgen Sie nun die Nadel in einem sicheren Sammelbehälter.



w wellion[®]

w wellion[®]

MED TRUST
THE MEDICAL SERVICES COMPANY

JETZT ANMELDEN!
www.wellion.at

w wellion Club