

w wellion®

Ihre ÖSTERREICHISCHE Gesundheitsmarke

**RICHTIG
BLUTZUCKER
MESSEN**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



- GROSSE ZAHLEN
- MAHLZEITEN-MARKER
- EINFACHE HANDHABUNG

Richtige Aufbewahrung des Gerätes

- Lagertemperatur beachten
- Betriebstemperatur beachten

Wenn die Umgebungstemperatur außerhalb der Betriebstemperatur des Messgerätes liegt, müssen Sie warten, bis die Betriebstemperatur erreicht ist (ca. 30 Minuten).

1. Vorbereitung

- Messgerät und Teststreifen **VOR** der Blutprobengewinnung vorbereiten



2. Sauberkeit

- Hände gründlich waschen und abtrocknen
- Saubere und trockene Punktionsstelle verwenden



3. Stechhilfe vorbereiten

- Verstellbare Kappe abschrauben



wellion[®]
LUNA*trio*



- AUSWURFTASTE
- KEIN KODIEREN (GLUKOSEMESSUNG)
- ZUSATZFUNKTIONEN: CHOLESTERIN- UND HARNSÄURE-MESSUNG



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



- BLUETOOTH-FUNKTION
- BELEUCHTETER TESTSTREIFEN EINSCHUB
- GROSSE ZAHLEN
- HINTERGRUND-BELEUCHTUNG

- Lanzette einführen
- Schutzkappe der Lanzette abdrehen



- Verstellbare Kappe wieder aufschrauben
- Stechtiefe einstellen (1 = am wenigsten tief, 10 = am tiefsten)




- Hintere Kappe zurückziehen, bis ein Klicken zu hören ist
- Auslösekнопf ist nun rot




4. Teststreifen vorbereiten


- **Ablaufdatum** auf Teststreifendose beachten
- **Lagertemperatur** beachten
- Teststreifendose nach Streifenentnahme **SOFORT** schließen
- **KEINE** feuchten, beschädigten oder abgelaufenen Teststreifen verwenden
- Teststreifen **NICHT** mit nassen oder schmutzigen Händen berühren
- Teststreifenende für Blutprobe **NICHT** berühren

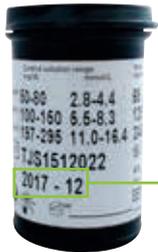

Ablaufdatum

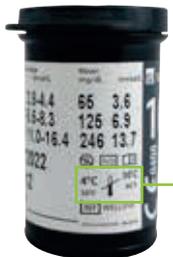

Lager-
temperatur

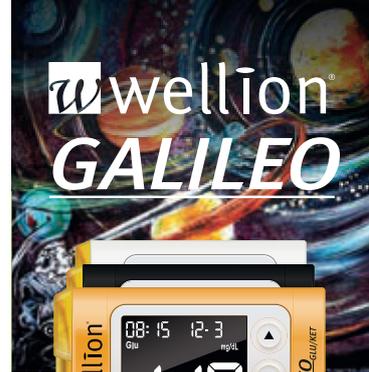

- **KEIN KODIEREN**
- **ZUSATZFUNKTION: KETONMESSUNG**
- **BELEUCHTETER TESTSTREIFEN-EINSCHUB**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

wellion® 1SHOT



**TURBO-
ENERGIESPENDER
MIT GESCHMACK**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

5. Teststreifen einführen

- Teststreifen einführen
- Teststreifenende für Blutprobe **NICHT** berühren




6. Blutgewinnung

- Stechhilfe an die gewünschte Punktionsstelle pressen
- Auslöseknopf drücken, um zu stechen



7. Messung durchführen

- Teststreifenspitze in den Blutstropfen eintauchen
- Blutstropfen wird automatisch aufgesaugt
- Teststreifenspitze in den Blutstropfen halten, bis ein Piepton zu hören ist
- Piepton = genügend Blut für die Messung vorhanden
- Ergebnis erscheint nach einem 6-Sekunden-Countdown
- Gebrauchten Teststreifen entfernen und ordnungsgemäß entsorgen

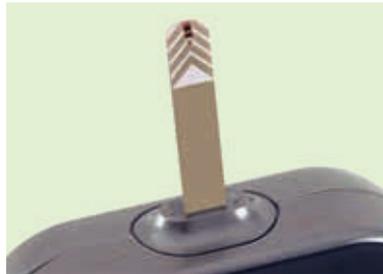

wwellion®
WAVE

*Blutdruckmessgerät
für das Handgelenk*



wwellion®
WAVE*plus*

*Blutdruckmessgerät
für den Oberarm*



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



NO
CODE



- KEIN KODIEREN
- KLEIN UND HANDLICH
- GROSSE ZAHLEN

8. Ergebnis interpretieren

- Idealbereich des Blutzuckerwerts für Erwachsene ohne Diabetes:
 - weniger als 100 mg/dl (5,6 mmol/l) vor dem Essen
 - weniger als 140 mg/dl (7,8 mmol/l) nach dem Essen⁽¹⁾
- Sprechen Sie mit Ihrem betreuenden Arzt und dem medizinischen Fachpersonal über einen für Sie geeigneten Zielbereich.
- „HI“: Der Blutzuckerwert könnte höher als 600 mg/dl (33,3 mmol/l) sein.
- „LO“: Der Blutzuckerwert könnte niedriger als 20 mg/dl (1,1 mmol/l) sein.
- Wiederholen Sie die Messung an der Fingerbeere. Erhalten Sie dasselbe Ergebnis noch einmal, ziehen Sie Ihren betreuenden Arzt oder medizinisches Fachpersonal zurate.

Referenz:

(1) American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes, 2010. Diabetes Care, 2010, 33 (Suppl. 1): 11–61.

9. Pflege und Lagerung des Messgerätes

- Bei Verunreinigung des Messgeräts verwenden Sie ein feuchtes (KEIN NASSES), fusselfreies Tuch mit einer milden Reinigungslösung.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Messgerät eindringt. Tauchen Sie das Messgerät niemals unter Wasser und halten Sie es niemals unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie keine Glas- oder Haushaltsreiniger für das Messgerät.
- Versuchen Sie nicht, die Öffnung für die Teststreifen zu reinigen.
- Behandeln Sie das Messgerät sorgfältig – wenn schwere Erschütterungen (z. B. beim Herunterfallen des Messgeräts) auftreten, könnte die Elektronik beschädigt werden.
- Betriebstemperatur des Messgerätes und des Teststreifens beachten.
- Vermeiden Sie es, das Messgerät an extrem heißen oder kalten Orten aufzubewahren (z. B. nahe einer Heizquelle oder in einem extrem heißen bzw. kalten Auto).
- Vermeiden Sie es, das Messgerät oder die Teststreifen an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu lagern oder zu benutzen (z. B. im Badezimmer oder in der Küche).
- Verschließen Sie den Deckel der Teststreifendose immer unmittelbar nach der Entnahme eines Teststreifens und vergewissern Sie sich, dass er fest geschlossen ist.
- Zerlegen Sie das Messgerät nicht in seine Einzelteile. Dadurch würde die Garantie erlöschen. Bei technischen Problemen oder Fragen wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler um Unterstützung.

wwellion®
Skin Care Cream



• **MIT 10% UREA
FÜR BESONDERS
INTENSIVE PFLEGE**

• **SCHUTZ GEGEN
TROCKENE HAUT**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



W wellion[®] *Club*

- Erstklassige Wellion Produkte
- Professioneller Service
- Spezielle Angebote nur für Mitglieder

Jetzt GRATIS Mitglied werden und viele interessante Vorteile nutzen!

Einfach Anmeldekarte auf der letzten Seite ausfüllen und an MED TRUST senden.

Ihre Wellion CLUB Vorteile:

- **int. Diabetikerausweis - Clubkarte**
im praktischen Scheckkartenformat - kann als internationaler Diabetikerausweis verwendet werden
- **kostenlose Batterien**
einmal pro Jahr – für Ihr Wellion Blutzuckermessgerät
- **kostenloses Wellion Messgerät**
Ihrer Wahl bei der Anmeldung zum Wellion CLUB
- **Wellion Servicetage**
regelmäßig in ganz Österreich – lassen Sie Ihr Messgerät überprüfen
- **Wellion Treuegeschenk nach Wahl**
- **kostenlose Wellion Diabetestagebücher**



- **Wellion Homepage**
www.wellion.at www.wellion.eu/de
Hier finden Sie nützliche Infos zum Thema sowie Informationsmaterialien und Bedienungsanleitungen zum Download. Zusätzliche Informationen erhalten Sie durch unseren Newsletter.
- **Wellion Journal**
GRATIS umfangreiche Informationen zum Thema Diabetes sowie zu neuen Produkten und aktuellen Trends
- **Wellion Kundenservice**
Wir sind für Sie da:

Tel.: 02626 64190
Mo.–Do. 08:00–19:00 Uhr
Fr. 08:00–17:00 Uhr

Registrieren Sie sich jetzt GRATIS und unverbindlich zum Wellion CLUB und profitieren Sie von den vielen Wellion CLUB Vorteilen.

Wellion CLUB Anmeldung

O JA, ich möchte Mitglied im Wellion CLUB werden und viele CLUB-Vorteile in Anspruch nehmen. Bitte senden Sie mir GRATIS mein Wellion Wunschnessgerät als Willkommensgeschenk zu. (Bitte auf der Rückseite gewünschtes Gerät ankreuzen und Karte vollständig und leserlich ausfüllen!)

Vorname _____

Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

E-Mail _____

Geb.-Datum _____

Ich willige ein, dass die MED TRUST Handelsges.m.b.H., Gewerbepark 10, 7221 Marz, in der Folge als „MED TRUST“ bezeichnet, meine oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Registrierung im Wellion CLUB und der Abwicklung der damit verbundenen Serviceleistungen, nämlich der Abwicklung der Zusendungen, der Erstsendung und der Erbringung des Dienstleistungsgeschenkes, für den Zeitraum des Wellion Clubs, für die Dauer der Zuweisung der Zuwendung des Wellion Journals sowie der Zuwendung regelmäßiger Informationen über Veranstaltungen und Produkte der MED TRUST per E-Mail und Post, verarbeitet. Diese Einwilligung kann ich jederzeit, kostenfrei und ohne Angabe von Gründen mittels E-Mail an office@medtrust.at oder mittels Brief an MED TRUST, Gewerbepark 10, 7221 Marz, widerrufen.

Datum/Unterschrift _____



Bitte freimachen,
falls Briefmarke
zur Hand



Tel.: (+43) 02626 / 64 190
Fax: (+43) 02626 / 64 190 - 77
DVR-Nummer: 0935859
E-Mail: office@medtrust.at

Antwortsendung

MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10
7221 Marz

WELL13AT-2023-02

w wellion[®] Club

ANMELDUNG

Wählen Sie Ihr GRATIS Wellion
Wunschmessgerät als Willkommensgeschenk.
Nähere Informationen zu den Geräten
finden Sie auf www.wellion.at.

CALLA^{light}

- brombeere
- weiss



CALLA^{mini}

- petrol
- schwarz



GALILEO^{GLU/KET}

- gelb
- schwarz
- weiss



LUNA^{trio}

- gelb
- pink
- schwarz
- weiss



CALLA^{classic}

- silber



CALLA^{dialog}



GALILEO^{compact}



Ihr Vorteil. Unser Service.
Ihre ÖSTERREICHISCHE
Gesundheitsmarke



Registrieren Sie sich jetzt GRATIS und unverbindlich zum
Wellion CLUB und profitieren Sie von den vielen CLUB Vorteilen.

w wellion[®]
Club